

# System2

## Limpiador desinfectante para descontaminar todos los sistemas de succión de la unidad o sillón dental

System2 está específicamente formulado para los sistemas de succión del sillón dental. Usado en forma continua Sytem-2, limpia, desodoriza y previene la formación de biocapa bacteriana o Biofilm.

### Económico

Cada litro de System-2 concentrado, rinde 50 litros de solución, diluido al 2% en agua de la llave.

### Simple y Seguro de Utilizar

Cada frasco de 1 litro posee su propio dosificador, asegurando así la adecuada dilución. System-2 no forma espuma. No es tóxico y tiene agradable acción desodorizante, con olor a lima limón, lo que enmascara otros olores desagradables.

### Instrucciones de Uso

1. Es aconsejable utilizar System-2 al final de cada día de trabajo
2. Utilizando el dosificador diluir 20cc en 1 litro de agua tibia de la llave a 40°

### Unidad Aspirador/ Eyector de Salida

1. Pre-enjuagar la tubería interna del sistema de succión con agua fría de la llave.
2. Inyectar la solución de System-2 al 2% en cada tubo a limpiar y dejar en contacto con la superficie interna al menos 2 minutos
3. Para terminar, enjuagar con agua fría de la llave.



### Actividad Microbiana

De acuerdo a ISO 9002 de estándares de calidad, Alkapharm confía la evaluación de la eficacia antimicrobiana de sus productos a laboratorios independientes acreditados por COFRAC, los cuales garantizan la reproducción de los resultados de estos estudios y la observancia de la metodología de prueba.

### Composición Química

Hidróxido de Potasio < 1%  
Surfactantes < 1%  
Biguamidina < 0.5%  
NO TOXICOS  
BIODEGRADABLES  
PH @ 2% Difusión = aprox. 10

### Precauciones de Uso (De acuerdo a las instrucciones de etiquetado)

Para uso profesional solamente

**CONCENTRADO:** Para ser diluido en agua según las instrucciones de uso.

No deglutir

No dejar al alcance de los niños

Evitar el contacto con los ojos y la piel

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente y buscar consejo médico

Para consejos de almacenaje consultar la ficha de seguridad  
Los contenedores vacíos deben ser muy bien enjuagados para su eliminación

### Presentación

Frasco de 1 litro concentrado con dosificador.

Bidón de 5 litros concentrado con bomba dispensadora.

**INTERMED S.A.**

**SYSTEM -2**

ES UN PRODUCTO IMPORTADO DESDE  
ALKAPHARM UK Y DISTRIBUIDO POR  
INTERMED S.A.

— ALKAZYME® —

+

— ALKACIDE® —

SIMON BOLIVAR 4931 ÑUÑO A SANTIAGO  
FONO : 266 17 50 FAX 266 25 38  
EMAIL : CONSULTAS@INTERMED.CL