

# ALKACIDE

## DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

“EL CONTROL INTEGRAL DE INFECCIONES INTRA - HOSPITALARIAS”



**ALKACIDE** está especialmente formulado para la desinfección del instrumental de endoscopia, y todo material termosensible.

LA MEJOR ELECCION  
PARA HOSPITALES, CLINICAS,  
CONSULTAS MEDICAS Y  
DENTALES


### TIEMPO DE CONTACTO RECOMENDADO

- Bactericida AFNOR NF-T 151 0.125 %  
5 minutos.
- Fungicida AFNOR NF-T 72-201 0.060 %  
15 minutos.
- Virucida AFNOR NF-T 72-180 2.0 %
- Micobacterium Tuberculosis 2.0 %  
15 minutos.

### PRESENTACION COMERCIAL

- Frasco de 1 litro con dosificador de 20 ml.
- Caja por 6 frascos.

HECHO EN FRANCIA POR ALKAPHARM  
BAJO CERTIFICACION CE N° 0459  
PRODUCCION SOBRE ISO 9002  
ISP CERTIFICADO N° SDRD / 221 / 99  
( CHILE )

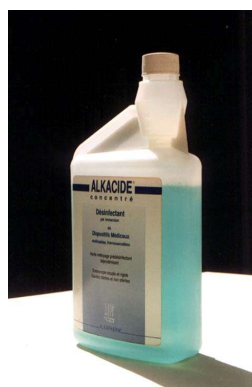

### CONCEPTO DE “A + A”

**ALKAZYME + ALKACIDE**

### CARACTERISTICAS :

#### ALKACIDE:

- Es una preparación desinfectante líquida con 0.17 % de Glutaraldehído potencializado por agentes tensioactivos.
- Es bactericida, micobactericida, fungicida y virucida. Es activo sobre esporas de la bacteria *Subtilis* variedad Niger.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Diluir una dosis de 20 ml. de **ALKACIDE** en 1 litro de agua.
- 1 litro de **ALKACIDE** permite preparar para la desinfección de alto nivel, dentro del proceso A+ A, 50 litros de solución activa.
- La solución de **ALKACIDE** preparada, se utiliza cuantas veces sea necesario en diferentes procedimientos, y será renovada cada 30 días.
- **ALKACIDE** concentrado tiene una duración de 3 años a partir de su fabricación.

### PRINCIPIOS ACTIVOS :

- GLUTARALDEHIDO POTENCIALIZADO Y PURIFICADO AL 0.17 %
- CLORURO DE DIDECIL-DIMETIL-AMONIO : MENOS DEL 5 %
- AGENTES TENSIOACTIVOS NO IONICOS : MENOS DEL 5 %
- ISOPROPANOL
- INHIBIDOR DE CORROSION

### TIEMPO DE ACCION :

15 minutos\*: BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA.

60 minutos\*: ESPORICIDA.

\* DENTRO DEL PROCESO A + A.

### VENTAJAS :

#### NO ES CORROSIVO

- **ALKACIDE** no corroe el material, no daña el instrumental, realiza desinfección de alto nivel en endoscopios, fibroscopios, y material termosensible.

#### ES SEGURO PARA EL PERSONAL QUE LO MANIPULA

**ALKACIDE** una vez diluido NO ES IRRITANTE para la piel y ojos de acuerdo con la norma 67 / 548 EEC.

- No tiene un olor irritante para las mucosas.
- Producto no tóxico cuando se utiliza en solución diluida al 0.5 % (0.06 ppm) o al 2 % (0.04 ppm)

#### NO NECESITA TESTIGO :

**ALKACIDE** es una solución que se mantiene estable en el tiempo.

#### PRECAUCIONES DE USO :

- Sólo para uso profesional.
- Diluir según las instrucciones.

**INTERMED S.A.**

**ALKACIDE**

ES UN PRODUCTO HECHO EN FRANCIA POR  
ALKAPHARM Y DISTRIBUIDO POR INTERMED  
SIMON BOLIVAR 4931 - ÑUÑO A - SANTIAGO

FONO: 266-1750 FAX: 266-2538

Email : intermed@terra.cl

— ALKAZYME® —

+

— ALKACIDE® —